

SISTEMA DI FISSAGGIO CANNULE TRACHEOSTOMIA

Sistema di fissaggio in due sezioni per cannule tracheostomiche

VANTAGGI:

- due sezioni: Per essere applicato più agevolmente alla cannula prima che questa sia posizionata sul paziente
- materiale morbido e confortevole, rinforzato nei punti di fissaggio alla cannula (Fascette in velcro)
- due misure: adulto e pediatrico



MODALITA' DI UTILIZZO



fissare le flange della cannula tracheostomica utilizzando le fascette **SOTTILI** in velcro (Queste ultime devono essere rivolte verso l'esterno - lato materiale più compatto/liscio)



fissare le fascette **SOTTILI** in velcro sulla parte esterna del fissaggio (lato materiale più compatto/liscio)



il collare/sistema fissaggio in base alla circonferenza necessaria fissare la fascetta **GRANDE** in velcro sulla parte esterna (lato materiale più compatto/liscio) del collare/fissaggio.



tagliare la parte in eccesso del sistema di fissaggio

Codice:

AR-0403003 Fissaggio misura adulto (Conf. 10 pezzi)

AR-0403004 Fissaggio misura pediatrica (Conf. 10 pezzi)